

LODI IMPLANTAT

Ideal für ganz oder teilweise zahnlose Patienten mit starkem Knochenabbau und schmalen Kieferkamm.

Packungsinhalt:

- (1) LOCATOR Aufbau
- (2) LODI Implantat
- (3) LODI Male Processing Pack




INTUITIVE UND SICHERE INSTRUMENTE FÜR EINE EINFACHE HANDHABUNG

CHIRURGIE-KASSETTE

Alle Locator Overdenture Instrumente haben eine Laser- und Tiefenmarkierung zur Erleichterung der Knochenbohrung und Implantatplatzierung.

Beinhaltet ein Set mit Bohrstopps für eine zusätzliche Tiefenkontrolle. Diese Funktion bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit während der Vorbohrung, vor allem bei der laparlosen OP-Technik.

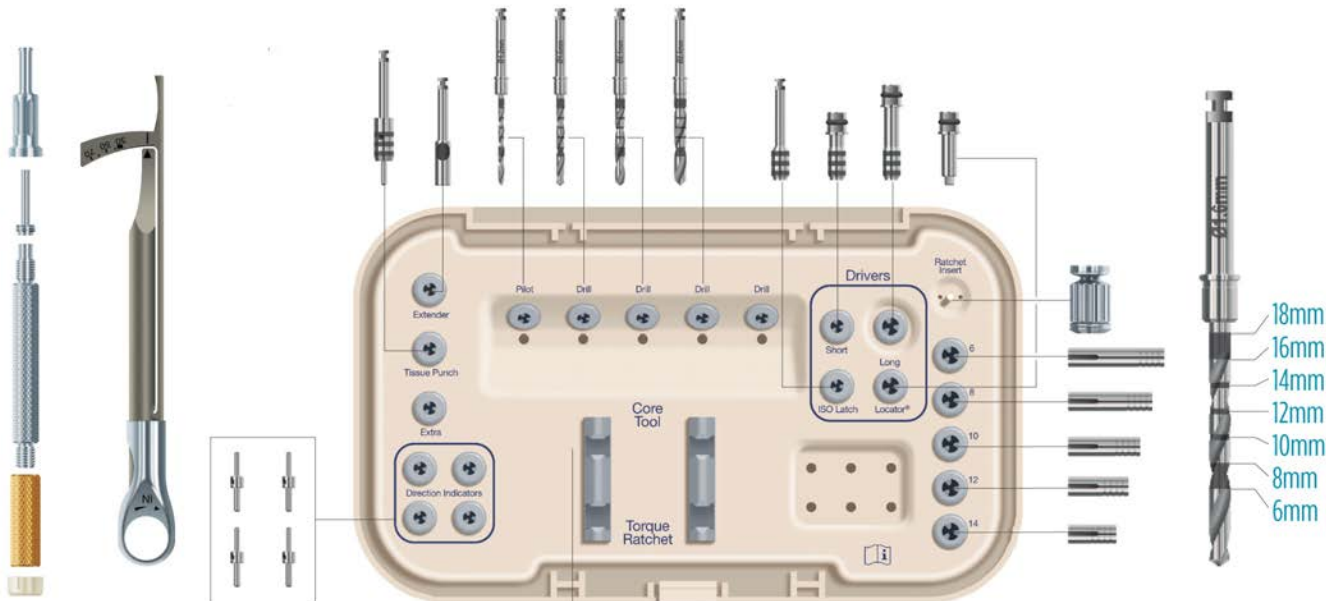

LOCATOR® OVERDENTURE IMPLANTAT SYSTEM (LODI)



Ein schlanker Implantatdurchmesser mit LOCATOR®, dem weltweit führenden Deckprothesenaufbau




KNOCHENTYP	FINALER BOHRDURCHMESSER		TIEFENBOHRER
	Implantat-durchmesser 2,4 mm	Implantat-durchmesser 2,9 mm	
D1	2,1 mm	2,4 mm	Implantatlänge
D2/D3/D4	1,6 mm	2,1 mm	4 mm weniger als die Implantatlänge

Klassifizierung der Knochentypen. Die Knochenqualität muss von dem behandelnden Arzt durch Vordiagnostik und während der Operation bestimmt werden, um den entsprechenden Drehmoment für die gewünschte Osteotomiegröße zu erzielen.

EINFACHE BOHRSEQUENZ FÜR ALLE KNOCHENTYPEN

Zum Beispiel: Lappenlose OP-Technik für ein 2,4 mm x 12 mm Implantat

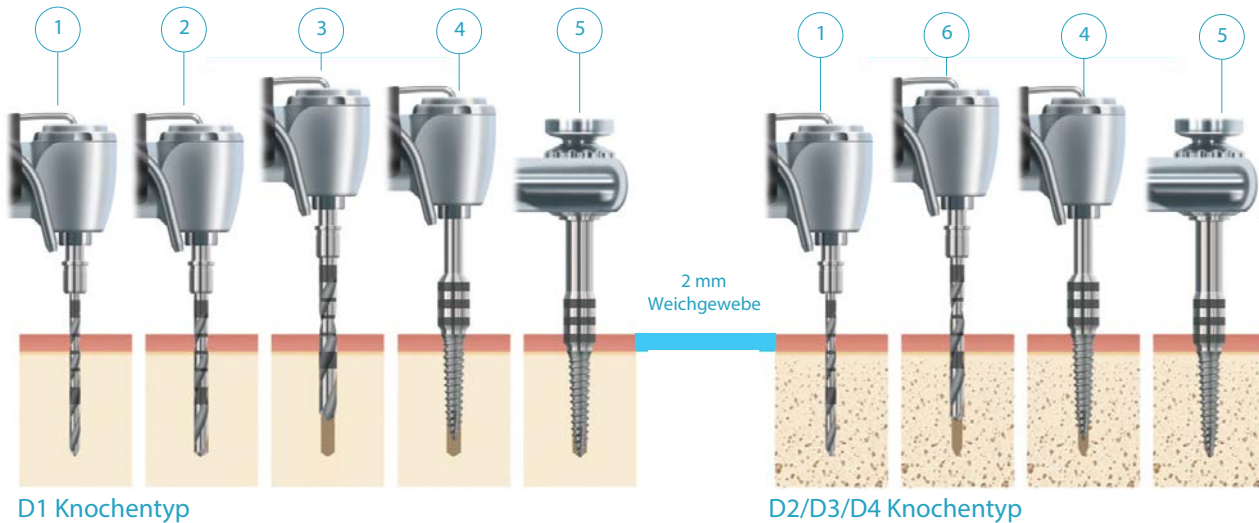
BOHRSEQUENZ

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 1,2 mm Pilotbohrer mit Tiefenmarkierung 14 mm 1,6 2 mm Bohrer mit Tiefenmarkierung 14 mm 2,1 mm 3 Bohrer mit Tiefenmarkierung 10 mm | <ol style="list-style-type: none"> 4 Gewinde bis zum ersten Stopp eindrehen 5 Implantat mit der Ratsche bis zur vorher bestimmten Tiefe eindrehen 6 (D2/D3/D4 Knochentyp) 1,6 mm Bohrer mit 10 mm Tiefenmarkierung (4 mm kürzer) |
|---|---|

Vertrieb:
RUNDAS GmbH

Amalienstr. 62
46537 Dinslaken

Tel.: 02064 625 95 50
Fax: 02064 625 95 80

info@rundas.de
www.rundas.de

RNDS210129


BESCHREIBUNG
ART-NR. 2,4 mm LODI Implantate, 2,5 mm Aufbau

- 07450 LODI 2,4 mm x 10 mm, 2,5 mm
- 07451 LODI 2,4 mm x 12mm, 2,5 mm
- 07452 LODI 2,4 mm x 14 mm, 2,5 mm

ART-NR. 2,4 mm LODI Implantate, 4,0 mm Aufbau

- 07455 LODI 2,4 mm x 10 mm, 4,0 mm
- 07456 LODI 2,4 mm x 12 mm, 4,0 mm
- 07457 LODI 2,4 mm x 14 mm, 4,0 mm

ART-NR. 2,9 mm LODI Implantate, 2,5 mm Aufbau

- 07460 LODI 2,9 mm x 10 mm, 2,5 mm
- 07461 LODI 2,9 mm x 12 mm, 2,5 mm
- 07462 LODI 2,9 mm x 14 mm, 2,5 mm

ART-NR. 2,9 mm LODI Implantate, 4,0 mm Aufbau

- 07465 LODI 2,9 mm x 10 mm, 4,0 mm
- 07466 LODI 2,9 mm x 12 mm, 4,0 mm
- 07467 LODI 2,9 mm x 14 mm, 4,0 mm

ART-NR. LODI LOCATOR Aufbauten

- 07351 LODI LOCATOR Aufbau, 2,5 mm Höhe
- 07352 LODI LOCATOR Aufbau, 4,0 mm Höhe

ART-NR. Premium Chirurgie Kassette

- 07422 Beinhaltet alle LODI chirurgischen Instrumente außer den 1,8 mm und 2,6 mm Bohrern